

NT(ナチュラルトランスルーセント)色を加え、
充実の3色全9種類 — Aadva Zirconia ディスク



CAD/CAM 用ジルコニアディスク

Aadva Zirconia ディスク

NT/EI/ST

ナチュラルトランスルーセント / エナメルインテンシブ / スタンダード



2|2 NTシングルクラウン



6| EIフルクラウン



2|2 STビルドアップクラウン


Aadva Zirconia ディスク NT/EI/ST

Aadva Zirconia ディスク EI/STにNTをラインナップ。


高強度のジルコニアディスクに光透過性がさらに向上したAadva ZirconiaディスクNTがラインナップに加わりました。高い光透過性を備えていますので、自然観のあるフルクラウンの製作が可能です。ディスク径は98.5mmに統一。全9種類です。

- 透明性3種、厚さ3種、計9種類の材料から選択でき、臨床の幅がさらに広がりました。
- ブリッジ設計も安心の曲げ強さ1,200MPa(EI/STのみ)です。
※NTは、600MPa。
- 生体親和性が高く、体にやさしい歯科材料です。
- ジルコニアクラウンへの応用でプレパレーション切削量を最小限に抑えられます。

全光線透過率

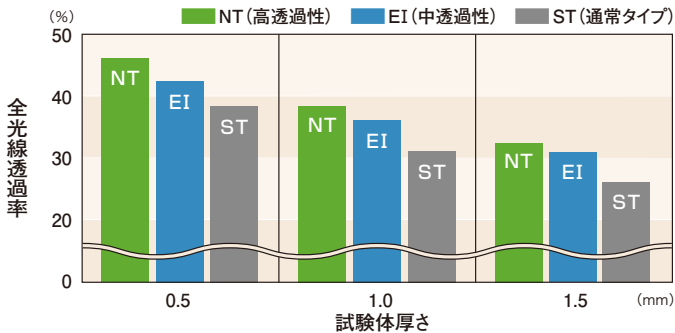

試験体を反射光で撮影

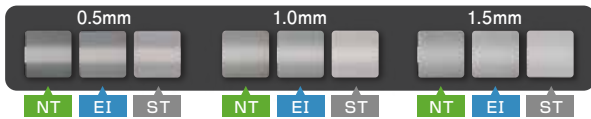

物理的性質

	NT	EI	ST
曲げ強さ (MPa)	600	1,200	1,200
弾性率 (GPa)	200	200	200
硬さ (HV)	1,250	1,250	1,250
熱膨張係数 (50-500°C)	9.8	10.3	10.3
密度 (g/cm ³)	6.05 (99.9%)	6.09 (99.9%)	6.05 (99.7%)
粒径 (nm)	40	40	90
適応	単冠から3歯ブリッジのコーピング、クラウン	単冠から14歯フルブリッジのコーピング、クラウン	

Aadva CAD/CAM システム



Aadva スキャン / Aadva ミル LD-I
 AadvaスキャンDB10(AD付) / AadvaスキャンD710(AD付)
 ※AD:アパルトメントデザイナー 一般医療機器 13B1X00155000216
 Aadva ミルLD-I一式(AadvaソフトL-CAM付) 一般医療機器 13B1X00155000202

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシー / 製造元 クレマ社 (オーストリア共和国)
 東京都文京区本郷3-2-14 〒113-0033 東京都板橋区蓮沼町76-1 〒174-8585 KLEMA Dentalprodukte GmbH


DIC (デンタルインフォメーションセンター)
 お客様窓口 ☎0120-416480
 受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祭日を除く)
<http://www.gcdental.co.jp>

支店
 ●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333
 営業所
 ●北海道 (011)729-2130 ●名古屋 (052)757-5722
 ●東北 (022)207-3370 ●九州 (092)441-1286

ディスク直径	14mm	18mm	25mm
高透過タイプ NT ナチュラルトランスルーセント	NT14	NT18	NT25
中透過タイプ EI エナメルインテンシブ	EI14	EI18	EI25
通常タイプ ST スタンダード	ST14	ST18	ST25

ジルコニアシリーズで最も透過率が高く、より自然観のある症例に対応します(3歯ブリッジまで適応)。
 STよりも透過率が高く、自然感のある色調表現ができます。フルカントウア、クリアランスの薄いケースに適しています。
 支台歯が変色歯や金属など、下地の色を隠したい場合に適しています。

Aadva ジルコニアクラウン厚さの目安

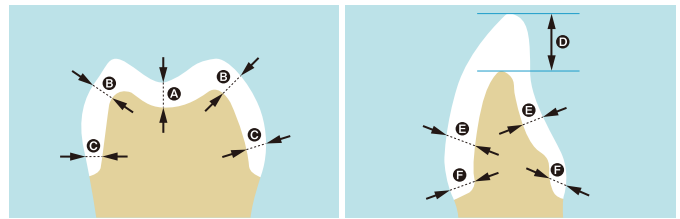

	A	B	C	D	E	F
フルジルコニアクラウン (コーピングの最低厚さ)	0.5(1.0)	0.5(0.8)	0.4(0.7)	0.4(0.7)	0.4(0.6)	0.4(0.5)
ジルコニアコーピング+ ポーセレンクラウン(築盛厚さ)	1.5~2.0	1.5	1.0	1.5~2.0	1.0~1.5	1.0

EI/ST: 黒字 NT: (緑字) 単位mm
 ※ポーセレンクラウン(築盛厚さ)は、NT/EI/ST共通です。

Aadva Zirconia ディスク




〈種類〉9種:NT14、NT18、NT25、EI14、EI18、EI25、ST14、ST18、ST25
 ※NT:ナチュラルトランスルーセント/EI:エナメルインテンシブ/ST:スタンダード
 ※数字はディスク厚さ/ディスク径:98.5mm(全種共通)
 〈包装〉14NT/14EI/14ST 18NT/18EI/18ST 25NT/25EI/25ST
 Aadva Zirconia ディスク 管理医療機器
 225AFBZX00051000
 Aadva Zirconia ディスク NT 管理医療機器
 226AFBZX00120000

セラミック用研削・研磨ポイント

セラシャイン

〈形態〉14種:CA:128C、112C、128M、112M、128F、112F
 HP:101E、113E、115E、115S E、101C、113C、115C、115S C
 〈包装〉1歯1本入:101E、101C、113E、113C、115E、115C、112C、112M、112F
 115S E、115S C
 1歯2本入:128C、128M、128F
 1歯3本入:112 アート
 (112C、112M、112F)

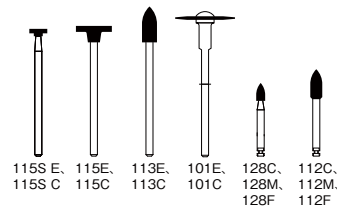

128 アソート(128C、128M、128F)
 一般医療機器 2883X10005000011

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。